



Rehataalkpad mit GoTalk NOW

Eiszauber

Sommerzeit ist Eis-Zeit! Aber immer nur Erdbeer und Schokolade ist langweilig, warum nicht mal Zitrone-Gurke mit Ketchup und Keks? Wir stellen Ihnen ein Seitenset für GoTalk NOW zur Verfügung, mit dem sich Abwechslung in den Eisbecher bringen lässt.



Das Zusammenstellen der Eisbecher erfolgt Schritt für Schritt: erst die Eissorte, dann Topping und Sauce. Neben den normalen Eissorten wie Schokolade gibt es z.B. Fischeis und Schokoladensauce und Erbsen als Toppings.



Und zum Abschluss darf natürlich auch die Bewertung des Eisbechers nicht fehlen.

Import der Dateien „rehavista-gtn-verrueckte-eisdiele.zip“ auf Ihr Rehataalkpad- so geht's:

- Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei „rehavista-gtn-verrueckte-eisdiele.zip“ auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem auch „iTunes“ installiert ist.

Hinweis: Die Dateien bitte NICHT entzippen.

- Nun verbinden Sie Ihr Rehataalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Anschließend öffnen Sie „iTunes“ und dort „Rehataalkpad“, dann gehen Sie auf „Apps“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
- Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei mit der linken Maustaste anklicken und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus verschieben.
- Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.