



MetaTalkDE

iOS-Update Hinweis



Sollte es nach dem aktuellen iOS-Update Schwierigkeiten mit MetaTalkDE geben, können Sie die wie folgt lösen:

Seit dem iOS 10.3 Update funktioniert der Export von Vokabularen und Seiten per Airdrop aus MetatalkDE nicht mehr, und zwar sowohl in der aktuellsten Version MetatalkDE 2.0.2, als auch in der Vorgängerversion. Exporte per Mail oder Dropbox sind von dem Problem nicht betroffen.

Da Mail und Dropbox eine Internetverbindung erfordern, ist Airdrop in Situationen ohne Internetzugang eine wichtige Alternative. Wurde iOS 10 schon geladen, gibt es zur Behebung des Problems einen Lösungsweg, der ein wenig umständlicher ist, aber auch ohne Internetzugang funktioniert: Der Export eines Vokabulars oder einer/ mehrerer Seite(n) wird per Mail gestartet. Man hört das typische Versendegeräusch, ohne Internetverbindung bleibt die Mail mit der Exportdatei aber im Postausgang liegen. Nun geht man in der App Mail auf Ausgang, tippt in der liegengebliebenen Mail die Exportdatei so lange an, bis sich das Popup öffnet, in der man Airdrop auswählen kann, und startet die Airdrop-Übertragung an das andere iPad.

Wenn man selbst zwar Internetzugang hat, das Empfänger-iPad jedoch nicht, kann man sich die Exportdatei zunächst selbst zuschicken und aus der empfangenen Mail – wie oben beschrieben- per Airdrop an das andere iPad senden.

Vielen Dank an Annette Kitzinger für diesen Lösungsweg.